

RESALIVA odběrová souprava


Návod k použití



1
Před samotným odběrem **30 min.**
nejezte, nepijte, nekuřte,
nevyplachujte si ústa.




2
Umyjte nebo dezinfikujte si ruce.

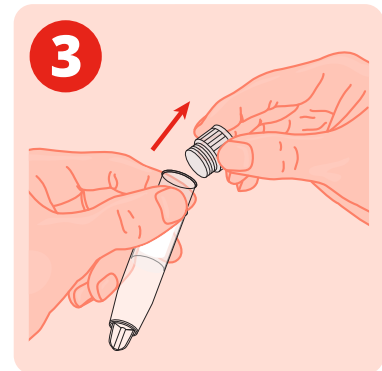

3
Opatrně otevřete zkumavku
s tyčinkou na sliny.



4
Tyčinku vložte do úst.

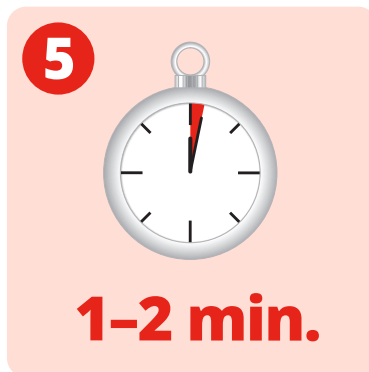

5
1-2 min.

Tyčinku nechte v ústech
1-2 min. bez žvýkání.




6
Tyčinku ústy vložte do zkumavky.



7
Zkumavku pořádně zavřete.



8
Na zkumavku nalepte přiložený
čárový kód, tak aby byl pouze na
dolní části odběrové zkumavky.

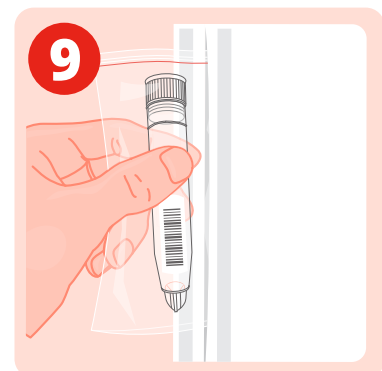

9
Zkumavku vložte v igelitovém
sáčku do obálky a odešlete
do laboratoře.

Katalogové číslo GS-316 Odběrová zkumavka na sliny | orders@genespector.com